

# FICHE TECHNIQUE

Lingette Acenil

Réf : 6660

## Lingettes antiseptiques et désinfectantes pour les mains, objets, surfaces et dispositifs médicaux de classe I.

Idéales en milieu médical et paramédical, hôpitaux, centres de soins, laboratoires d'analyses, services urgences...

Multi-usages : mains et surfaces

Large spectre d'activité (bactéries, levures, virus)

Pratique : 1ère lingette tirée. Conçu et fabriqué en France

### PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES DE LA SOLUTION

#### Bactéricide

EN 1040 en 1 mn, EN 1276\* en 30s, EN 13727\* en 30s, EN 13727\* en 30s (SARM staphylocoque doré résistant à la méthicilline), ERV Enterococcus faecium résistants à la vancomycine, Escherichia coli beta-lactamase à spectre étendu)

EN 13697\*\* en 30 s, EN 14561\* 5 mn

#### Levuricide

EN 1275, en 1 mn

EN 13624\*, en 1 mn

EN 13697\*, en 1 mn

EN 1650+A1\*, en 1 mn

EN 14562\*, en 5 mn

#### Virucide

Actif sur Rotavirus en 1min et virus de la vaccine (Couvre notamment les virus enveloppés suivants: Hépatite B, Hépatite C, grippe, HIV) en 30s selon EN 14476+A1\* (v.2015)

\*Études réalisées en conditions de propreté

\*\*Études réalisées en conditions de saleté

### MODE D'EMPLOI

Tirer horizontalement une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe. Bien refermer le conditionnement après usage. Frotter la lingette sur les mains et les surfaces préalablement nettoyées, pendant au moins 30s. Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire. Ne pas rincer. Laisser sécher. Jeter les lingettes usagées dans un container à déchets

### CARACTERISTIQUES

Non-tissé: viscosité blanche

pH: (pur) 4,5-6,5

Odeur : mentholée

Substances actives de la solution: Ethanol CAS 64-17-5 (48mg/g) Chlorure de benzalkonium CAS 85409-22-9 (3mg/g) Acide D-gluconique CAS 18472-51-0 (1,2mg/g)

### CONSERVATION

Conserver dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage. Avant ouverture conservation 30 mois à l'abri de la chaleur, dans les conditions normales de températures. Dès l'ouverture, utiliser dans le mois.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit Biocide TP1 et TP2. Usage exclusivement professionnel

Éliminer le contenu et le récipient dans un conteneur à déchets. Ne pas jeter le produit dans l'environnement. Ne pas avaler. Ne pas utiliser avec d'autres produits. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Pour plus de renseignements se référer à la FDS du produit. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

En cas d'urgence, contacter le Centre Antipoison France :  
**+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)**